



**EMODIAL**

Via Finati, 4/A - Ferrara - ITALY  
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414  
[www.emodial.com](http://www.emodial.com) - [info@emodial.com](mailto:info@emodial.com)



Vertrieb durch:

**USmed**  
Medizinprodukte

Bunte Berna 31 - 34123 Kassel  
Fon +49 (0)561.7668635 - Fax +49 (0)561.7668636  
[www.usmed-online.de](http://www.usmed-online.de) - [info@usmed-online.de](mailto:info@usmed-online.de)


Ref.DE001 - Rev. 09/2019



**EMODIAL**

**DIAFIX<sup>®</sup>**

Fistula Druckband

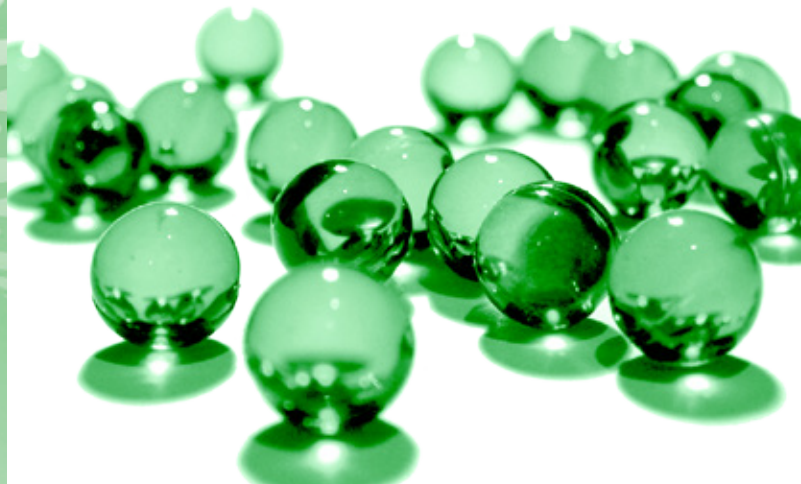

### BESCHREIBUNG

AV-Fistula Druckband in zwei verschiedenen Ausführungen mit und ohne absorbierende Pads.

### INDIKATION

Kompressionsbedingte Blutstillung der Punktionsstellen nach Entfernung der Dialysekanülen am arteriovenösen Shunt.

Auch geeignet für Patienten die intravenöse Therapie oder Bluttransfusionen erhalten.

### ZWECK


Entwickelt um:

- Blutungen zu stoppen und das Blutungsrisiko, über Kompression auf die Punktionsstellen, zu verringern.
- Den Beginn von Komplikationen des Gefäßzugangs durch subkutane Blutungen, die die Entwicklung von intravaskulären Blutgerinnsel begünstigen, verringern.
- Okklusion der Fistula durch regulierbare Kompression zu verhindern.



### GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Platzieren Sie einen Tupfer/Pad auf die Punktionsstelle über der Kanüle und halten Sie diesen mit dem Daumen.
- 2 Ziehen Sie das Band an.
- 3 Entfernen Sie die Kanüle.
- 4 Justieren Sie die Spannung des Bandes um die optimale Fistula-Kompression zu erzielen und die Blutung zu stoppen.
- 5 Entfernen Sie das Druckband sobald Sie die Blutstillung erreicht haben.
- 6 Wiederholen Sie die Prozedur für die zweite Punktionsstelle.

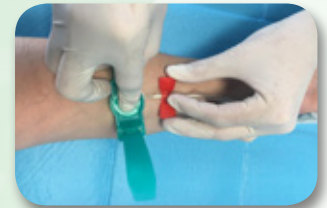

### BESTELLDATEN

Daten und technische Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

ART. NR.	Zertifikat	BANDAGE (cm)			PAD (cm)	STÜCK / PKT.	PKT. / BOX
		Farbe	L	H			
B0088/N/VND	CE	GRÜN	38	1,5	no	Bulk	500
S0040/B	CE 0373	GRÜN	38	2	ø 2,6	1	200

- KLASSIFIKATION • KLASSE I MEDIZINPRODUKT  
 BIOKOMPATIBILITÄT • IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER UNI EN ISO 10993 STANDARD  
 STERILISATION • UNSTERILE OHNE PAD, STERILE MIT PAD (GAMMA-STRAHLEN)  
 VERFALLDATUM • 5 JAHRE (MODELL MIT PAD)

• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG