



EMODIAL s.r.l.

Via Finati, 4a - Ferrara (ITALY)
Tel. (+39) 0532 978198 - Fax (+39) 0532 978414
www.emodial.it - info@emodial.it



Vertrieb durch:

USmed
Medizinprodukte

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
Fon +49 (0)561.7668635 | Fax +49 (0)561.7668636
www.usmed-online.de | info@usmed-online.de

Rev. AUGUST 2016 BETAFIX - ref.D002



EMODIAL s.r.l.

BETAFIX®

Fistula Verband



BETAFIX®

Beschreibung:

Elastischer Fistula-Verband, ausgestattet mit einem zweischichtigen hochabsorbierenden Pad und Fixierpflaster für bessere Dichtigkeit.

Indikation:

Kompressionsbedingte hämostatische Wirkung, speziell zur Versorgung der AV-Fistel nach Entfernung der Dialysekanülen.

Auch geeignet für Patienten, die eine intravenöse Therapie oder Bluttransfusion erhalten.

Zweck:

Entwickelt, um durch Kompression die Blutung der AV-Fistula Punktionsstellen zu stoppen und das Blutungsrisiko zu reduzieren. Gleichzeitig wirkt der Verband als Barriere gegen die Infektionsgefahr. Die nicht-haftende biokompatible Schicht auf dem Pad ermöglicht eine atraumatische Entfernung des Verbandes. Das Pflaster unterstützt die korrekte Position des Pads zu halten.



Fistula Verband

Gebrauchsanweisung:

- 1** Ersten Teil des Verbandes mit dem Pad abrollen.
- 2** Positionieren Sie das Pad auf der Punktionsstelle und fixieren Sie dies mit dem Daumen. Ziehen Sie dann die Kanüle.
- 3** Ziehen Sie den Verband ausreichend an, um die Blutung zu stoppen.
- 4** Entfernen Sie die Schutzfolie und fixieren Sie den Verband mit dem Pflaster.



Daten und technische Spezifikationen können sich ohne Ankündigung ändern.

Klassifikation: Klasse I Medizinprodukt
Biokompatibilität: Im Kontakt mit der Haut hat das Material den Biokompatibilitätstest in Übereinstimmung mit den UNI EN ISO 10993 Standards bestanden
Sterilisation: γ - ray
Haltbarkeit: 5 Jahre

Bestelldaten:

| Code | PZN | Pad | VE |
|-------|----------|-----|-----------|
| S0029 | 12535806 | 2,6 | 1x500 St. |
| S0030 | 12535841 | 2,6 | 2x300 St. |
| S0041 | 12535829 | 3,5 | 2x300 St. |