

Vertrieb durch:

US|med
MEDIZINPRODUKTE


EMODIAL

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
T: +49 (0)561.766 86 35 | F: +49 (0)561.766 86 36
www.usmed-medizinprodukte.de
info@usmed-online.de

EXIT-POCKET® WP


EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

CE

Ref. DE0013H.USMED - Rev. 07/2023

**Wasserdichter
Verband-Beutel für
den Katheterschutz**

EXIT-POCKET® WP

Wasserdichter Beutel für den Katheterschutz

BESCHREIBUNG

Medizinprodukt zum Schutz der Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen. Wasserdichter, an vier Seiten geschlossener tertiärer Verband-Beutel zur Befestigung auf der Haut.

VERWENDUNGSZWECK

Schutzvorrichtung für die Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen bei Kontakt des Patienten mit Wasser (Duschen, Baden, Schwimmen).

INDIKATION

Schutz der Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen. Geeignet für alle zentral-venöse Kathetersysteme. Der Verband-Beutel ist vollständig wasserdicht und kann so mikrobielle Kontaminationen vermeiden.

VORTEILE

- Schnelles, einfaches Anbringen.
- Bequeme Passform.
- Steigert die Lebensqualität katheterisierter Patienten.
- Einfache und schnelle Entfernung.
- Keine Durchfeuchtung des Primär und Sekundärverbands.

Patentiert



CODE	PZN	GRÖÖE (CM)Öffnung	Indikation	Stück / Box
S2005H/WP #703192201	125 356 57	Ø 5	Duschen/ Baden	50 ST.
S2011H/WP #703192203	125 356 86	9 x 10 (BxL)	Duschen/ Baden	50 ST.
S2013HL/WP #703192206	141 412 53	13 x 11 (BxL)	Duschen/ Baden	50 ST.
S2013H/WP #703192205	141 412 47	11 x 13 (BxL)	Duschen/ Baden	50 ST.
S2007HL/WP #703192211	187 138 12	7 x 5,5 (BxL)	Duschen/ Baden	25 ST.
S2007H/WP #703192210	187 138 06	5,5 x 7 (BxL)	Duschen/ Baden	25 ST.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Reinigen Sie die Haut um den Katheter vorsichtig mit kreisenden Bewegungen, beginnend von innen, unter Verwendung geeigneter Reinigungslösungen.
2. Trocken tupfen ohne zu reiben.
3. Führen Sie die Katheterextensionen in den Verband-Beutel. Ggf. mit vorhandener Kathetertasche (nonwoven).
4. Entfernen Sie die Folie von der Klebestelle.
5. Platzieren Sie den unteren Rand des Klebefolie an der Unterkante der Katheterextension bzw. des Primärverbandes und kleben Sie den Verband von unten nach oben vollständig auf um Falten zu vermeiden. ACHTUNG: Wenn ein Primärverband vorhanden ist, achten Sie darauf das die Klebefolie des Verband-Beutel diesen nicht überlappt.
6. Drücken Sie mit der Hand die Kleberänder an, um eine optimale Haftung auf der Haut zu gewährleisten (Dieser Vorgang ist wichtig für die Dichtigkeit des Verband-Beutels. Nach Anbringen warten Sie 10 Minuten, bis die Klebekraft vollständig eingetreten ist.



KLASSIFIKATION • MEDIZINPRODUKT - KLASSE I
BIOKOMPATIBILITÄT • IN ÜBEREINSTIMMUNG UNI EN ISO 10993 STANDARD
STERILIZATION • UNSTERILE
HALTBARKEIT • 2 JAHRE



• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG