



EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com



Vertrieb durch:

US|med
MEDIZINPRODUKTE

Bunte Berna 31 - 34123 Kassel
Fon +49 (0)561.7668635 - Fax +49 (0)561.7668636
www.usmed-medizinprodukte.de
info@usmed-online.de

Ref.DE001 - Rev. 02/2023



EMODIAL

DIAFIX[®]

Fistula Druckband



BESCHREIBUNG

AV-Fistula Druckband in zwei verschiedenen Ausführungen mit und ohne absorbierende Pads.

INDIKATION

Kompressionsbedingte Blutstillung der Punktionsstellen nach Entfernung der Dialysekanülen am arteriovenösen Shunt.

Auch geeignet für Patienten die intravenöse Therapie oder Bluttransfusionen erhalten.

ZWECK


Entwickelt um:

- Blutungen zu stoppen und das Blutungsrisiko, über Kompression auf die Punktionsstellen, zu verringern.
- Den Beginn von Komplikationen des Gefäßzugangs durch subkutane Blutungen, die die Entwicklung von intravaskulären Blutgerinnsel begünstigen, verringern.
- Okklusion der Fistula durch regulierbare Kompression zu verhindern.



GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1 Platzieren Sie einen Tupfer/Pad auf die Punktionsstelle über der Kanüle und halten Sie diesen mit dem Daumen.
- 2 Ziehen Sie das Band an.
- 3 Entfernen Sie die Kanüle.
- 4 Justieren Sie die Spannung des Bandes um die optimale Fistula-Kompression zu erzielen und die Blutung zu stoppen.
- 5 Entfernen Sie das Druckband sobald Sie die Blutstillung erreicht haben.
- 6 Wiederholen Sie die Prozedur für die zweite Punktionsstelle.

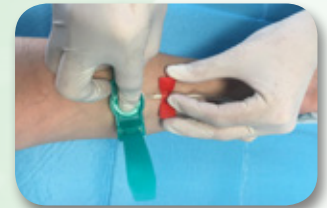

BESTELLDATEN

Daten und technische Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

| ART. NR. | Zertifikat | BANDAGE (cm) | | | PAD (cm) | STÜCK / PKT. | PKT. / BOX |
|-------------|------------|--------------|----|-----|----------|--------------|------------|
| | | Farbe | L | H | | | |
| B0088/N/VND | CE | GRÜN | 38 | 1,5 | no | Bulk | 500 |
| S0040/B | CE 0373 | GRÜN | 38 | 2 | ø 2,6 | 1 | 200 |

- KLASSIFIKATION • KLASSE I MEDIZINPRODUKT
 BIOKOMPATIBILITÄT • IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER UNI EN ISO 10993 STANDARD
 STERILISATION • UNSTERILE OHNE PAD, STERILE MIT PAD (GAMMA-STRAHLEN)
 VERFALLDATUM • 5 JAHRE (MODELL MIT PAD)



• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG