



CORE
SCIENTIFIC
CREATIONS

Citra-Gen®
Access innovation

US|med
MEDIZINPRODUKTE

USmed Medizinprodukte e.K | Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
Tel. 0561 76686-35 | Fax 0561 76686-36
info@usmed-online.de | www.usmed-medizinprodukte.de



WOUNDCLOT

Dialyse

Advanced Bleeding Control™

GEBRAUCHSANWEISUNG **WOUNDCLOT**

Gebrauchsanweisung **WOUNDCLOT** für die Shuntversorgung in der Hämodialyse

Diese Gebrauchsanweisung erläutert die Handhabung von **WOUNDCLOT** in Bezug auf die Versorgung der Punktionsstellen an AV- Fistel Shunts oder PTFE-Grafts. Folgen Sie dabei den Hygiene-Leitlinien nach hausinternem Protokoll.

1. Bereiten Sie **WOUNDCLOT** Gaze durch einmaliges Falten auf 2,5 cm x 2,5 cm vor. Außerdem falten Sie eine 10 x 10 cm Gaze zweimal zu 5 x 5 cm, oder legen sich Mulltupfer bereit.
2. Entfernen Sie die Fixierpflaster der Kanüle.
3. Die **WOUNDCLOT** Gaze wird mit der oben aufgesetzten Gaze / Mulltupfer direkt auf die Punktionsstelle gelegt.
4. Die Kanüle vorsichtig entfernen.
5. Drücken Sie vorsichtig mit zwei Fingern auf die Punktionsaustrittsstelle um die subkutane Öffnung zu schließen. Halten Sie konstant und ruhig, um signifikante Bewegung der Gaze zu verhindern (Abbildung 1).



Wenn etwas Blut in der oberen Gaze zu sehen ist, ist das normal und vorteilhaft. **WOUNDCLOT** ist am effektivsten in der Kombination mit Blut.

6. Wenn die intensive Blutung aufgehört hat, kann die Gaze auf der Oberseite des **WOUNDCLOT** mit einem Klebeband fixiert werden, um beim Entfernen der zweiten Kanüle an Ort und Stelle zu bleiben (Abbildung 2). Die erste Überprüfung, ob die Blutung aufgehört hat, wird nach 3 Minuten empfohlen. Wenn die Blutung anhält, abwarten und nach weiteren 3 Minuten erneut überprüfen.



7. Führen Sie die **Schritte 1 bis 7** bei der zweiten Punktionsstelle durch.
8. Wenn die zweite Punktionsstelle mit Klebeband fixiert wurde (intensive Blutung ist gestoppt), kann die erste Gaze mit **WOUNDCLOT** entfernt werden (Abbildung 3).
9. Versorgen Sie die Punktionsstelle z.B. mit einem Pflaster / Verband nach hausinternem Protokoll (Beispiel in Abbildung 4). Das Entfernen dieses Pflasters / Verbands ist auch nach hausinternem Protokoll durchzuführen.

