



EMODIAL s.r.l.

Via Finati, 4a - Ferrara (ITALY)
Tel. (+39) 0532 978198 - Fax (+39) 0532 978414
www.emodial.it - info@emodial.it



Vertrieb durch:

US|med
MEDIZINPRODUKTE

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
Fon +49 (0)561.7668635 | Fax +49 (0)561.7668636
www.usmed-medizinprodukte.de
info@usmed-online.de

Rev.FEBRUAR 2023 EMOSTAN - ref.D003



EMODIAL s.r.l.

EMOSTAN®

Fistula pad



EMOSTAN®

Fistula pad

Beschreibung:

Hoch absorbierendes Pad.

Indikation:


Kompressionsbedingte hämostatische Wirkung, speziell zur Versorgung der AV-Fistel nach Entfernung der Dialysekanülen.

Auch geeignet für Patienten, die eine intravenöse Therapie oder Bluttransfusion erhalten.

Zweck:

Entwickelt, um durch Kompression die Blutung der AV-Fistula Punctionsstellen zu stoppen und das Blutungsrisiko zu reduzieren.

Die nicht-haftende biokompatible Schicht auf dem Pad ermöglicht eine atraumatische Entfernung des Pad.

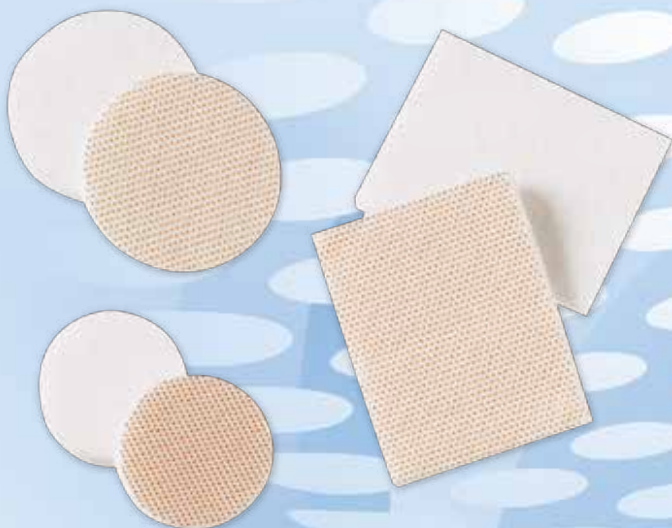

Gebrauchsanweisung

- 1 Positionieren Sie das Pad auf der Punctionsstelle und fixieren Sie es mit dem Finger.



- 2 Entfernen Sie die Kanüle und drücken Sie angemessene Zeit, um die Blutung zu stoppen.



Daten und technische Spezifikationen könne sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Bestelldaten

Klassifikation: Klasse I Medizinprodukt
Biokompatibilität: Im Kontakt mit der Haut hat das Material den Biokompatibilitätstest in Übereinstimmung mit den UNI EN ISO 10993 Standards bestanden
Sterilisation: γ - ray
Haltbarkeit: 5 Jahre

CODE	PZN	Dimension cm		Inhalt Blister pack	Menge Box
		Thickness mm			
S0210	12535723	\varnothing 2,6	8 ± 1	2	500