

Vertrieb durch:

US|med
MEDIZINPRODUKTE

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
T: +49 (0)561 766 86 35 | F: +49 (0)561 766 86 35
www.usmed-medizinprodukte.de
info@usmed-online.de



EMODIAL

Via Finati, 4/A- Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198
Fax. +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com



Stand: Version 01. DE / 07 2023



EMODIAL

EXIT-POCKET®
STANDARD T



EXIT-POCKET® STANDARD T

DER KOMFORT KATHETERVERBAND AUS BESONDERS WEICHEN
VERBAND-MATERIAL

BESCHREIBUNG

Non-Woven Tasche, dreiseitig geschlossen mit doppelten Pflastersystem zur Fixierung auf der Haut. Zum Schutz des zentral-venösen Katheters in der behandlungsfreien Zeit.


BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Steriles Einmalprodukt
- Zugfreie Fixierung von Kathetersystemen
- Schutz vor Verunreinigungen bzw. mechanischen Schäden zwischen den Behandlungszeiten.
- Schnelle und einfache Anwendung

INDIKATION

- Verhinderung einer mikrobiellen Kontamination der Katheter-Austrittsstelle (KAST).
- Vorbeugung von Hautreizungen durch Schutz des Bereichs um die Katheter-Austrittsstelle (KAST) vor der mechanischen Reibung des Katheters.
- Verbesserung der Lebensqualität des Patienten.
- Kompatibel mit allen Arten von Kathetern: Temporär, Langzeit (Permanent).

Die Kathetertasche
ist nicht wasserdicht 

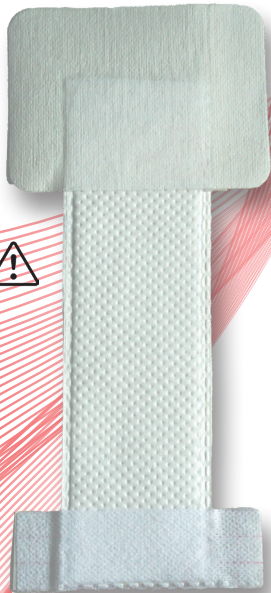

FAKTOR LEBENSQUALITÄT

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Katheter in die Tasche einführen. Achten Sie auf die Öffnung der Tasche.
2. Entfernen Sie das Schutzpapier von der größeren Klebefläche.
3. Platzieren Sie die Kathetertasche unter Berücksichtigung des Primärverbandes.
4. Entfernen Sie das kleine Schutzpapier der Klebefläche und fixieren den Verband vorsichtig auf der Haut.
5. Im Anschluss entfernen Sie noch die Schmale Schutzfolie und fixieren den Verband nun komplett.

VERBLEIBDAUER

Die Kathetertasche ist ein Einmalprodukt und muss zu jeder Behandlung gewechselt werden.

WARNUNGEN

- Achten Sie darauf, dass die Katheterschenkel, beim Einführen und Entfernen aus der Tasche und beim Ablösen von der Haut, nicht gezogen werden.

ENTSORGUNGSMETHODEN

Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen für medizinische Abfälle entsorgt werden.

Emodial Srl lehnt jede Verantwortung ab, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung des Produktes oder der Nichteinhaltung der vorliegenden Anweisungen ergibt.

Sollte sich bei der Verwendung des Geräts ein schwerer Unfall ereignen, ist der Benutzer verpflichtet, diesen dem Hersteller Emodial und der zuständigen Behörde des Staates, in dem der Benutzer ansässig ist, zu melden.

Produktname	PZN	Art.Nr.	Größe (cm)	Stck. Box	Karton
Exit-Pocket® Standard T	187 511 84	703 192 890	16 x 5 cm	25	500 St.

KLASSIFIKATION:	Medizinprodukt IIa
BIOKOMPATIBILITÄT:	In Übereinstimmung mit Uni EN ISO 10993 Standard
STERILISATION:	Ethylene Oxide- ETO
HALTBARKEIT:	3 Jahre
	Zur Einmaligen Verwendung

