

*fistula*STOP®

**Ein innovatives
Druckmittel bei Fisteln**



FistulaStop ersetzt den manuellen Druck nach einer Dialysebehandlung

FistulaStop ist angenehm für den Patienten

- Angenehm für Fisteln und Transplantate
- Übt ständig einen gleichmäßigen Druck aus
- Einfache Möglichkeit, um den Blutfluss zu stoppen
- Patient muss nach der Dialyse nicht mehr auf die Fistel drücken

FistulaStop bietet auch Vorteile für das Pflegepersonal

- Ergonomisch, da kein Druck mit der Hand mehr notwendig ist
- Leicht mit Alkohol oder heißem Wasser zu reinigen
- Wieder verwendbar
- Kann durch die mit dem Namen markierte Aufbewahrungsbox einfach einem bestimmten Patienten zugewiesen werden
- Eine Größe für alle Passformen
- Zeitsparend

FistulaStop ist einfach anzuwenden

- Setzen Sie einen Tupfer zwischen dem Fistelzugang und dem FistulaStop
- Stellen Sie sicher, dass die Wölbung den Fistelzugang abdeckt
- Ziehen Sie den Streifen um den Arm herum und befestigen Sie diesen
- Entfernen Sie FistulaStop, wenn der Blutfluss gestoppt hat und bevor der Patient nach Hause geht
- FistulaStop sollte einmal pro Monat gewechselt werden (bei ständigem Gebrauch)

FistulaStop wurde in Schweden hergestellt

www.fistulastop.com



ellen Druckverband



Bestellinformationen

Produkt	Bestellnummer
FistulaStop 1 Paar	F 500

CE

*fistula*STOP®



*fistula*STOP®

Ein innovatives Druckmittel bei Fisteln

WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-MAIL info@curemednordic.se PHONE +46 31 47 58 00

POSTADDRESS Box 1128, 405 23 Göteborg, Sweden VISITING ADDRESS Gruvgatan 35B, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden

US|med
MEDIZINPRODUKTE

Vertrieb Deutschland:

USmed Medizinprodukte e.K. | Bunte Berna 31 | 34123 Kassel |

Fon: 0561.76636-35 | Fax: 0561.76686-36

www.usmed-medizinprodukte.de | info@usmed-online.de