

LineStrap™

- HALTEN SIE MEDIZINISCHE SCHLAUCHSYSTEME FEST

- Für medizinische Schlauchsysteme
- Sitzt bequem
- Einfach zu nutzen
- Leicht zu reinigen
- 3 verschiedene Größen



LineStrap™ wurde entwickelt, um zu verhindern, dass medizinische Schläuche beispielsweise Nadeln herausziehen, und sicherstellen, dass die Schläuche während der Behandlung bequem sitzen. Mit LineStrap™ wird das Risiko vermieden, dass die Schläuche gegen den Körper gedrückt werden oder in Gegenständen stecken bleiben, die die Nadel verschieben oder die Behandlung beeinträchtigen können.

LineStrap™ verfügt über zwei Sicherheitshalter, mit denen venöse arterielle Blutschläuche sowie auch andere medizinische Schlauchsysteme befestigt werden können. LineStrap™ wird in einer leichten Textilqualität hergestellt und ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: **Large, Medium** und **Small**.

Anweisungen


1. Legen Sie LineStrap am Unterarm oder an dem Teil des Arms an, an dem Sie die Schläuche befestigen wollen.
2. Zum Befestigen fädeln Sie LineStrap durch die Öse. Sichern Sie LineStrap, indem Sie sicherstellen, dass die Befestigungsfläche in die Filzoberfläche einhakt.
3. Öffnen Sie den Sicherheitshalter, wovon es zwei Stück gibt.
4. Befestigen Sie den Schlauch / die Schläuche in LineStrap™ und beginnen Sie die Behandlung.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchklemmen in Zugrichtung positioniert sind, und halten Sie den Schlauch / die Schläuche an.

Reinigung

Mit einem milden Reinigungsmittel waschen und bei schwacher Hitze trocknen lassen. Schließen Sie das Armband vor dem Waschen, um zu vermeiden, dass sich Flusen auf der Befestigungsfläche ansammeln.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Kontaktieren Sie uns unter info@curemednordic.se oder telefonisch unter 031-47 58 00.

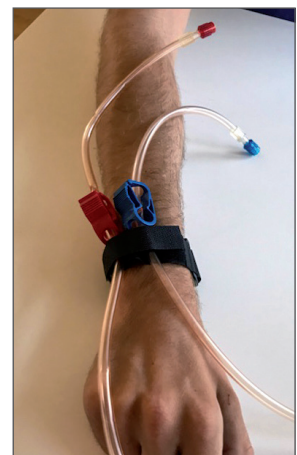

Hergestellt
in Schweden

Bestellcode	Beschreibung
HA 600-077	Large
HY 540-077	Medium
HP 540-077	Small

