



EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com



Vertrieb durch:

US|med
MEDIZINPRODUKTE

Bunte Berna 31 - 34123 Kassel
Fon +49 (0)561.7668635 - Fax +49 (0)561.7668636
www.usmed-medizinprodukte.de
info@usmed-online.de


Ref. DE0020 - Rev. 02/2023



EMODIAL

EXIT-PRO[®] AG
SoftTouch

Katheter Verbände

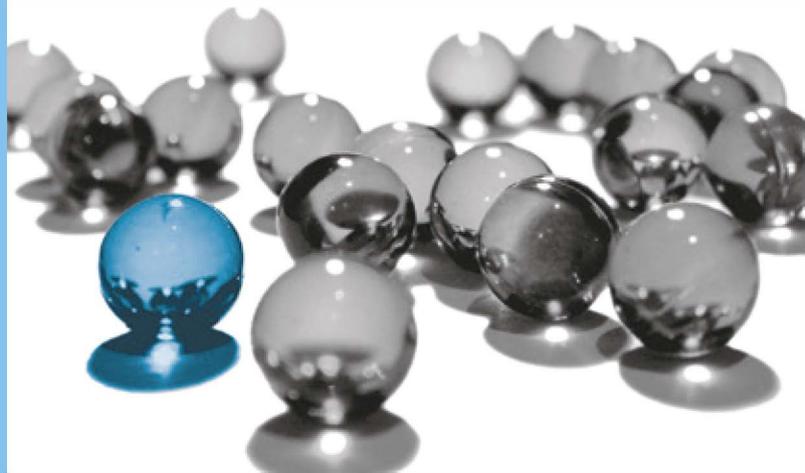

BESCHREIBUNG

EXIT-PRO AG SoftTouch ist ein Verband für den Katheter-Exit mit Silberionen freisetzendem Antihaftefilm, der auf einem transpirierenden, Non-Woven (Vlies) Pflaster aufgebracht wird, das mit einem hypoallergenen Haftgel auf Silikonbasis mit "SoftTouch" -Technologie beschichtet ist.

VERWENDUNGSZWECK

Kompletter Verband der Austrittsstelle von intravaskulären Kathetern. Es sind keine Sekundärverbände erforderlich. Kompatibel mit allen Standardkathetern.

INDIKATIONEN

Der Verband hat eine doppelte Funktion:

- Der Silberionen freisetzende Film hat eine sofortigen und dauerhafte antimikrobielle Wirkung, um das lokale Risiko von Infektionen der Katheter-Austrittsstelle und des Tunnels sowie der damit verbundenen Sepsis zu verringern.
- Der "SoftTouch" Klebefilm schützt die Haut vor mechanischen Schäden, verursacht durch ständige Entfernung des Pflaster (als Folge wiederholter Anwendungen), und unterstützt die Gewebereparatur. Optimale Lösung für Patienten mit trockener, feuchter oder schuppiger Haut, die bei Patienten mit intravaskulären Kathetern (Dialyse und Onkologie) weit verbreitet ist.



Die Sanftheit des Soft-Touch Klebstoffs ist kombiniert mit der antibakteriellen Wirkung von Silber-Ionen.

Ideal für chronische Patienten und Patienten mit zarter, oder empfindlicher Haut.




BESTELLDATEN

Bestelldaten und technische Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

BESTELL-Nr	PFLASTER (cm)	PAD (cm)	LOCH ø (cm)	STÜCK / PACKG.	PACKG. / BOX
S0810/AG	10 x 8	5 x 4	0,4	1	50

Traditionelle vs. SoftTouch Verbände

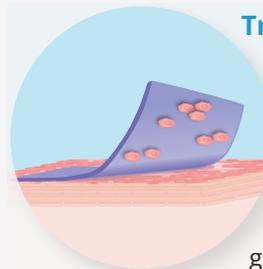


Traditionelle Verbände

haften nicht gleichmäßig auf der Haut; stattdessen hinterlassen sie Zwischenräume die sich nach und nach füllen. Das bewirkt eine Zugkraft auf die Haut und verstärkt die Fixierung. Sie sind für Langzeitanwendungen geeignet.

SoftTouch Verbände

Haften gleichmäßig auf der Haut und haben eine niedrige Oberflächenspannung. Die Entfernung ist weniger traumatisch, dieses Verhalten macht sie ideal für die häufige Anwendung für zarte und empfindliche Haut.

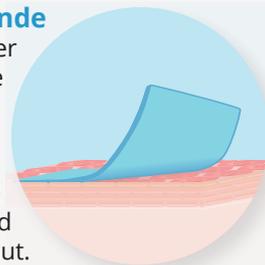

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Desinfizieren Sie die Katheter-Austrittsstelle mit einem geeigneten Haut-Desinfektionsmittel (keine Jod- haltigen Präparate verwenden) und lassen Sie sie komplett abtrocknen.
2. Heben Sie die beiden Klappen der Schutzfolie des Pflasters an.
3. Plazieren Sie das Pad und bringen Sie es in Kontakt mit der Haut am Exit. Fixieren Sie es durch sanften Druck auf die umgebende Klebefläche des Pflasters.
4. Schließen Sie die Entfernung der Schutzfolie ab.
5. Belassen Sie **EXIT-PRO AG SoftTouch** bis zu einer Woche auf dem Exit, sofern dieser keine erste Anzeichen einer Infektion zeigt.

⚠️ WARNUNGEN

- Nicht bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegen Silber anwenden.
- Nicht bei Untersuchungen wie Röntgenstrahlen, Ultraschall, Diathermie, Magnetresonanz oder Radiotherapie verwenden.
- Nicht in Kombination mit Lösungen auf Jodbasis verwenden
- Das Produkt ersetzt nicht die entsprechenden systemischen Therapien, die bei klinischen Infektionen erforderlich sind
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durch.

KLASSIFIKATION	• KLASSE III (RULE 13 MDD 93/42 EEC)
BIOKOMPATIBILITÄT	• IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER UNI EN ISO 10993 STANDARD
STERILISATION	• ETHYLENOXID
VERFALLDATUM	• 3 JAHRE



• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG