



**EMODIAL®**

Via Finati, 4-4/A - Ferrara - ITALY  
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414  
www.emodial.com - info@emodial.com

Vertrieb durch:

**US|med**  
MEDIZINPRODUKTE

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel  
Fon +49 (0)561.7668635 | Fax +49 (0)561.7668636  
www.usmed-medizinprodukte.de  
info@usmed-online.de

Ref. DE0022-US - Rev.02/2023



**EMODIAL®**

**EMOSTAN®**  
HAEMOSTATIC ALGINATE **A L G**

Hämostatische Shunt pads  
auf Kalziumalginatbasis



Reduktion der Abdrückzeit

## BESCHREIBUNG

**EMOSTAN ALG** ist ein mehrschichtiges hämostatisches Pad für AV-Shunts, auf Basis von Kalziumalginat.

## VERWENDUNGSZWECK

Zum Stoppen von Blutungen bei allen Patienten mit Hämostasestörungen.

Dazu können gehören: ältere Patienten, Diabetiker, Personen mit Vitamin-K-Mangel, sowie Patienten, die mit Heparin oder Warfarin behandelt werden, Patienten mit Lebererkrankungen, Patienten mit Erbkrankheiten (wie Hämophilie und Von-Willebrand-Krankheit) und übergewichtige Patienten.

## ZWECK DER NUTZUNG

- Blutungskontrolle bei Patienten, die sich einer Dialysebehandlung unterziehen.
- Beschleunigung des Hämostaseprozesses.
- Geeignet zur Verringerung von Blutungen dank der kontinuierlichen Kompression an den Punktionsstellen.

## EINFACH ZU BENUTZEN


1. Legen Sie das Pad auf die Einstichstelle.
2. Entfernen Sie die Kanüle und halten Sie das Pad an der Punktionsstelle, während Sie einen angemessenen Druck über einen Zeitraum aufrechterhalten, der ausreicht, um einen erheblichen Rückgang des Blutflusses zu gewährleisten.
3. Entfernen Sie **EMOSTAN ALG** spätestens 4 Stunden nach dem Auftragen und legen Sie einen primären Verband an, z. B. eine Bandage oder ein Pflaster.

## BESTELLDATEN

Die Daten und technischen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CODE	PZN	PAD (cm)	PCS / PACK	PACKS / BOX
S25252A	17570144	2.5 x 2.5	2	25


## Vergleich mit Standardverbänden

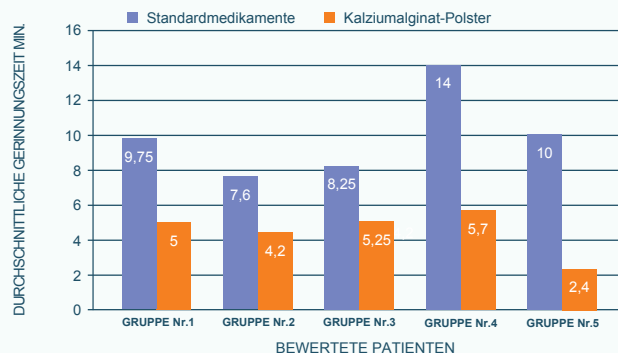

Der Vergleich mit Standardverbänden hat gezeigt, dass Verbände auf Kalziumalginatbasis in **85,6% der Fälle** die Blutungszeit verkürzen.

## WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Sobald die Blutstillung erreicht ist, spätestens 4 Stunden nach der Anwendung entfernen.
- Um den Verband zu entfernen und falls er auf dem Wundgebiet eintrocknet, muss er mit physiologischer Lösung rehydriert werden.
- Danach kann der Verband leicht von der Wunde entfernt werden, ohne sie zu verletzen.
- Der Verband hat eine hämostatische Funktion, er ersetzt nicht den Primärverband.

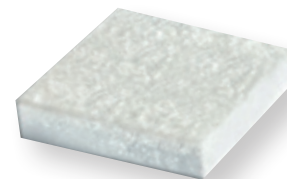

KLASSIFIZIERUNG • MEDIZINPRODUKT CE1936  
STERILISIERUNG • GAMMA RAYS