

Vertrieb durch:

US|med
MEDIZINPRODUKTE

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
Fon +49 (0)561.7668635 | Fax +49 (0)561.7668636
www.usmed-medizinprodukte.de
info@usmed-online.de



EMODIAL

EXIT-POCKET® WP



EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com



Ref. DE0013H.USMED - Rev. 03/2023

**Wasserdichter
Verband-Beutel für
den Katheterschutz**

EXIT-POCKET® WP

Wasserdichter Beutel für den Katheterschutz

BESCHREIBUNG

Medizinprodukt zum Schutz der Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen. Wasserdichter, an vier Seiten geschlossener tertiärer Verband-Beutel zur Befestigung auf der Haut.

VERWENDUNGSZWECK

Schutzvorrichtung für die Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen bei Kontakt des Patienten mit Wasser (Duschen, Baden, Schwimmen).

INDIKATION

Schutz der Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen. Geeignet für alle zentral-venöse Kathetersysteme. Der Verband-Beutel ist vollständig wasserdicht und kann so mikrobielle Kontaminationen vermeiden.

VORTEILE

- Schnelles, einfaches Anbringen.
- Bequeme Passform.
- Steigert die Lebensqualität katheterisierter Patienten.
- Einfache und schnelle Entfernung.
- Keine Durchfeuchtung des Primär und Sekundärverbands.

Patentiert

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Reinigen Sie die Haut um den Katheter vorsichtig mit kreisenden Bewegungen, beginnend von innen, unter Verwendung geeigneter Reinigungslösungen.
2. Trocken tupfen ohne zu reiben.
3. Führen Sie die Katheterextensionen in den Verband-Beutel. Ggf. mit vorhandener Kathetertasche (nonwoven).
4. Entfernen Sie die Folie von der Klebestelle.
5. Platzieren Sie den unteren Rand des Klebefolies an der Unterkante der Katheterextension bzw. des Primärverbandes und kleben Sie den Verband von unten nach oben vollständig auf um Falten zu vermeiden. ACHTUNG: Wenn ein Primärverband vorhanden ist, achten Sie darauf dass die Klebefolie des Verband-Beutels diesen nicht überlappt.
6. Drücken Sie mit der Hand die Kleberänder an, um eine optimale Haftung auf der Haut zu gewährleisten (Dieser Vorgang ist wichtig für die Dichtigkeit des Verband-Beutels. Nach Anbringen warten Sie 10 Minuten, bis die Klebekraft vollständig eingetreten ist).



Bestelldaten

Daten und technische Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

CODE	PZN	GRÖÖE (cm)	INDIKATION	Stck. BOX
		ÖFFNUNG		
S2005H/WP	12535657	Ø 5	Bad und Dusche	50
S2011H/WP	12535686	10 x 9	Bad und Dusche	50
S2013HL/WP	14141247	13 x 11	Bad und Dusche	50
S2013H/WP	14141253	11 x 13	Bad und Dusche	50
S2007HL/WP	18713806	5,5 x 7	Bad und Dusche	25
S2007H/WP	18713812	7 x 5,5	Bad und Dusche	25

KLASSIFIKATION • MEDIZINPRODUKT - KLASSE I
BIOKOMPATIBILITÄT • IN ÜBEREINSTIMMUNG UNI EN ISO 10993 STANDARD
STERILIZATION • UNSTERILE
HALTBARKEIT • 2 JAHRE



• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG