


Shuntkatheter

Supercath™ PRO

- *Passive Sicherheitsabdeckung mit vollständig umschlossenem Nadelschutz*
- *Integriertes Rückschlagventil, das das Auslaufen von Blut vermeidet und den Anschluss an den Blutschlauch ohne Klemmen ermöglicht*
- *Eine schonende Hämodialysebehandlung mit Kunststoffkatheterschlauch*

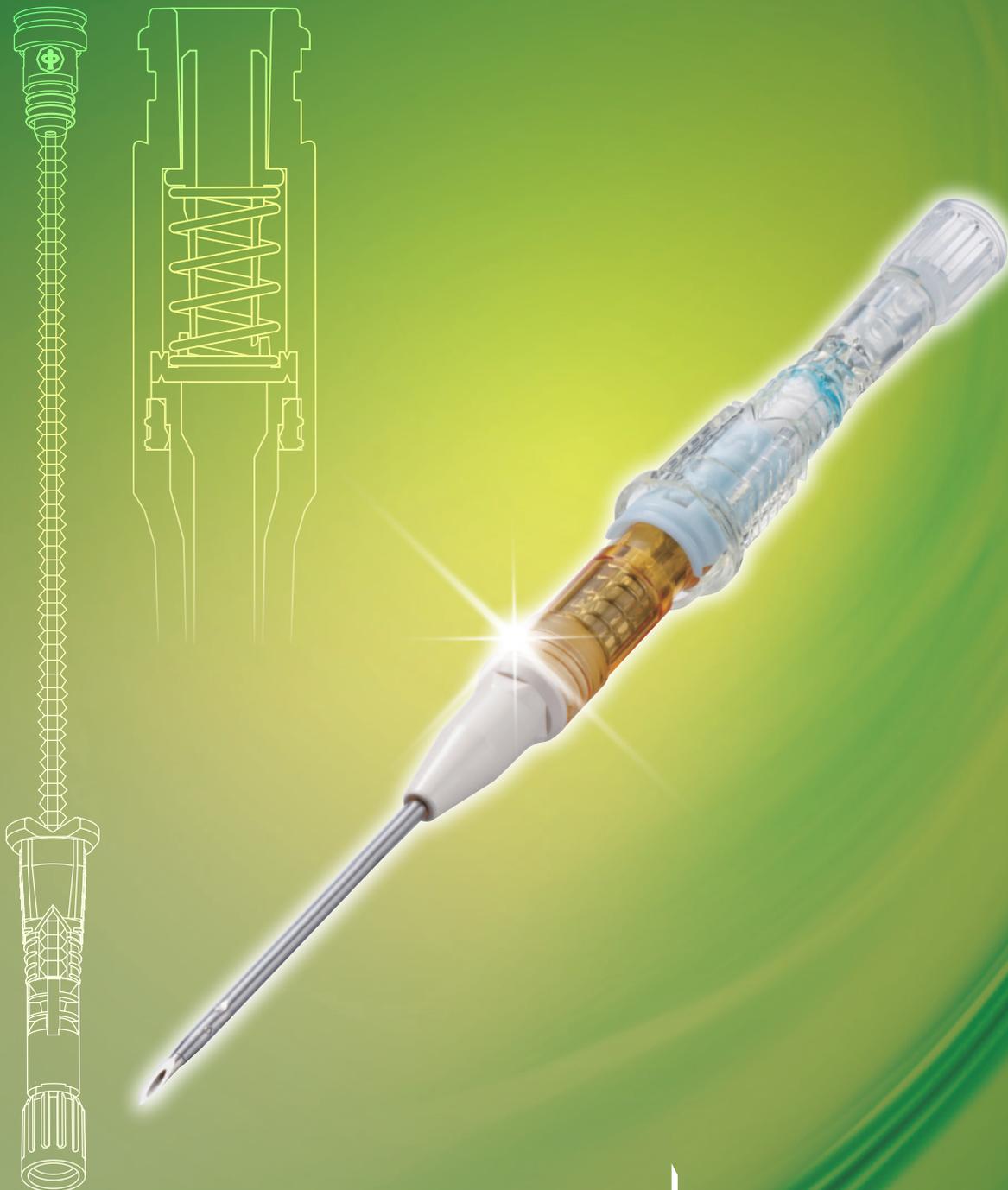

MEDIKIT

Schutz vor
Nadelstichverletzungen


Doppelter Schutz

Schutz vor
Blutkontakt

Passive Sicherheitsabdeckungs- Technologie



- **Schutzfolie:** Entwickelt für einen leichtgängigen Gebrauch und zum Schutz vor Blutkontakt durch kontaminierte Nadeln
- **Sicherheitsclip:** Hilft Nadelstichverletzungen und Blutkontakt zu vermeiden

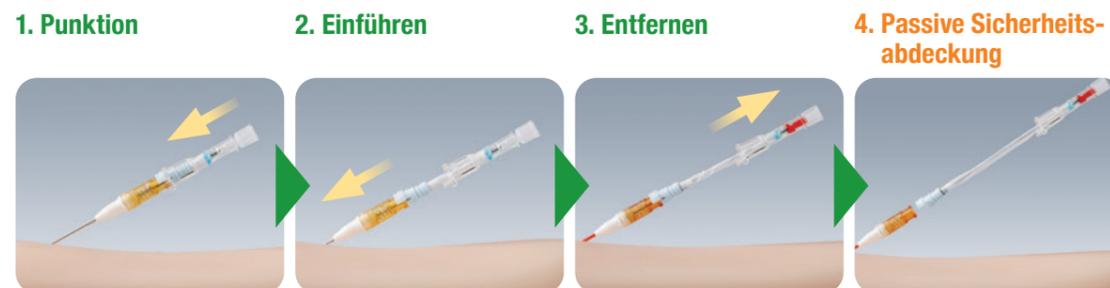

Rückschlagventil-Technologie




- **Integriertes Rückschlagventil:** Entwickelt zur Unterstützung des manuellen Drucks, vermeidet das Auslaufen von Blut und erleichtert die kurzzeitige Unterbrechung der Behandlung



- **Anschließen/Trennen des Blutschlauchs:**

Integriertes Rückschlagventil

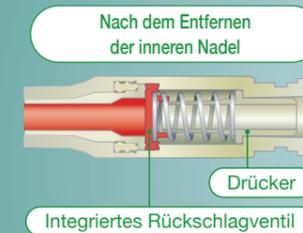

Das Rückschlagventil schließt und hilft dabei, das Auslaufen von Blut zu vermeiden.



Das Rückschlagventil öffnet automatisch bei Verbindung mit dem Blutschlauch. Achten Sie darauf, dass die Sicherungsmutter des Blutschlauchs fest angezogen ist.



Das Rückschlagventil schließt automatisch, wenn der Konnektor (männlich) des Blutschlauchs entfernt wird und hilft dabei, das Auslaufen von Blut zu vermeiden.

Shuntkatheter

Supercath™ PRO

3-Facetten-Schrägschliff

Entwickelt für eine schonende Punktion



Integriertes Rückschlagventil

Entwickelt zur Unterstützung des manuellen Drucks, vermeidet das Auslaufen von Blut und erleichtert die kurzzeitige Unterbrechung der Behandlung

Nabe

Ermöglicht die Kontrolle des Blutrückflusses

Äußere Nadel



Kunststoffkatheterschlauch

Entwickelt für eine schonende Einführung des Katheterschlauchs



Eine Metallnadel*

*Beispielbild

Innere Nadel



Schutzfolie

Entwickelt zum Schutz vor Blutkontakt durch kontaminierte Nadeln

Sicherheitsclip

Hilft Nadelstichverletzungen und Blutkontakt zu vermeiden

Sicherheitsabdeckung

Katalognummer	Katheterdurchmesser		Farbcode	Katheterlänge (mm)	Anzahl der seitlichen Löcher	Verpackung	
	O.D. (mm) / Gauge	I.D. (mm) / Gauge					
SP402-14 (25)	2.1 / 14G	1.7 / 16G	Hellgrün	25	4	50 St. / Regalbox	
SP402-14 (33)	2.1 / 14G	1.7 / 16G		33	4		
SP402-15 (25)	1.9 / 15G	1.5 / 17G	Blaugrau	25	4		1000 St. / Versandkarton (20 Regalboxen)
SP402-15 (33)	1.9 / 15G	1.5 / 17G		33	4		
SP402-16 (25)	1.7 / 16G	1.3 / 18G	Weiß	25	4		
SP402-16 (33)	1.7 / 16G	1.3 / 18G		33	4		
SP402-17 (25)	1.5 / 17G	1.1 / 19G	Rotviolett	25	4		
SP402-17 (33)	1.5 / 17G	1.1 / 19G		33	4		

Elektronenstrahl-Sterilisation

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Instrument verwenden.



CE 0197

Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union:
Bernas Medical
55 Rue Stephenson, 75018 Paris, France

2022.04
20220407J1357-1
Copyright © 2022 Medikit Co., Ltd.

Medikit Co., Ltd.

1-13-2, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034, Japan
TEL: +81-3-3839-0492 | FAX: +81-3-3839-0644 | www.medikit.co.jp/english/

Hersteller:

Togo Medikit Co., Ltd.

17148-6, Aza Kamekawa, Oaza Hichiya,
Hyuga, Miyazaki 883-0062, Japan

Vertrieb in Europa durch:

Medikit Europe GmbH

Gerbermühlstraße 7

60594 Frankfurt am Main, Germany

TEL: +49-69-8700-660-60 | FAX: +49-69-8700-660-89

www.medikit-europe.de | info@medikit-europe.de

USmed
MEDIZINPRODUKTE

Ihr Partner in der Dialyse

USmed-Medizinprodukte e.K.

Bunte Berna 31

34123 Kassel

Tel.: +49 561 76686-35

Fax: +49 561 76686-36

Web: www.usmed-medizinprodukte.de