



Replacement Clamp™

- Die Ersatzklemme ist eine Reparaturklemme für Dialysekatheter*.
- Die Ersatzklemme ermöglicht das Ersetzen einer defekten Klemme am Dialysekatheter, ohne den Luer-Lock-Anschluss zu entfernen.
- Neues ergonomisches Design.
- Hergestellt in Schweden.
- CE-zertifiziert.



Schritt 1:

Entfernen Sie die alte Klemme. Schieben Sie die Ersatzklemme von der Seite ein.

Schritt 2:

Befestigen Sie das Röhrchen in der Kerbe der Ersatzklemme. Die Klemme ist jetzt einsatzbereit.



**Die Ersatzklemme ist nur zur vorübergehenden Verwendung bestimmt. Ein beschädigter Katheter sollte immer ersetzt werden. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Katheterlieferanten sorgfältig.*

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	PZN	Verpackung
712 19 RCM03	Ersatzklemme, rot & blau	175 701 96	2 Stück (1 rote & 1 blaue) / Beutel

Vertrieb Deutschland: USmed Medizinprodukte e.K. | Bunte Berna 31 | 34123 Kassel | info@usmed-online.de
www.usmed-online.de | Fon: 0561.76636-35 | Fax: 0561.76686-36