

Vertrieb durch:



Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
T: +49 (0)561.766 86 35 | F: +49 (0)561.766 86 36
www.usmed-medizinprodukte.de
info@usmed-online.de



EMODIAL

Kontenklasse bzw. Kostenträger		Geb.-, Vers.-, Sp.-St.		Geb.-Platz		Gebühren-Nummer + 04	
Name, Vorname des Versicherten		geb. am		Geb.-Nr.		Geb.-St.	
Mustermann Erika		12.08.1964		6 7 8 9			
Heidestraße 17 51147 Köln		10/14					
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		Anzahl - Arbeitsplätze		Feste	
	A123456789			1. Veränderung			
Betriebsstellen-Nr.	Arzt-Nr.	Datum		2. Veränderung			
		10.07.2012		3. Veränderung			
Rp. (Bitte Lesekunde durchlesen!)				Vertragsbeispiel			
50 Stück Exit Pocket WP Türlin PZN 120 356 88				27/111100			
*****				Psychologische Gemeinschaftspraxis			
*****				Dr. med. Markus Mustermann			
*****				Dr. rer. nat. Erik Mustermann			
*****				Dorfstraße 1			
*****				51069 Köln			
*****				Tel. 02 21 14 87 65 43			
bber				Unterschrift des Arztes			
Bei Arbeitsunfall auszufüllen				Muster 18 (7.2006)			
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer					

EXIT-POCKET® WP

Verordnungsfähig nach § 31 SGB V



EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Wasserdichter
Katheter-
Schutzverband

Ref. DE0013H.USMED - Rev. 08/2025

BESCHREIBUNG

Medizinprodukt zum Schutz der Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen. Wasserdichter, an vier Seiten geschlossener tertiärer Verband-Beutel zur Befestigung auf der Haut.

VERWENDUNGSZWECK

Schutzvorrichtung für die Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen bei Kontakt des Patienten mit Wasser (Duschen, Baden, Schwimmen).

INDIKATION

Schutz der Katheteraustrittsstelle (KAST) und der Katheterextensionen. Geeignet für alle zentral-venöse Kathetersysteme. Der Verband-Beutel ist vollständig wasserdicht und kann so mikrobielle Kontaminationen vermeiden.

VORTEILE

- Schnelles, einfaches Anbringen.
- Bequeme Passform.
- Steigert die Lebensqualität katheterisierter Patienten.
- Einfache und schnelle Entfernung.
- Keine Durchfeuchtung des Primär- und Sekundärverbands.

Patentiert



Code	PZN	Größe (CM) Öffnung	Indikation	Stück / Box
S2005H/WP #703192201	125 356 57	ø 5	Duschen/ Baden	50 St.
S2011H/WP #703192203	125 356 86	9x10 (BxL)	Duschen/ Baden	50 St.
S2013HL/WP #703192206	141 412 53	13x11 (BxL)	Duschen/ Baden	50 St.
S2013H/WP #703192205	141 412 47	11x13 (BxL)	Duschen/ Baden	50 St.
S2013HL/WP #703192211	187 138 12	7x5,5 (BxL)	Duschen/ Baden	25 St.
S2013H/WP #703192210	187 138 06	5,5x7 (BxL)	Duschen/ Baden	25 St.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Reinigen Sie die Haut um den Katheter vorsichtig mit kreisenden Bewegungen, beginnend von innen, unter Verwendung geeigneter Reinigungslösungen.
2. Trocknen tupfen, ohne zu reiben.
3. Führen Sie die Katheterextensionen in den Verband-Beutel. Ggf. mit vorhandener Kathetertasche (nonwoven).
4. Entfernen Sie die Folie von der Klebstelle.
5. Platzieren Sie den unteren Rand der Klebefolie an der Unterkante der Katheterextension bzw. des Primärverbandes und kleben Sie den Verband von unten nach oben vollständig auf, um Falten zu vermeiden. ACHTUNG: Wenn ein Primärverband vorhanden ist, achten Sie darauf das die Klebefolie des Verband-Beutel diesen nicht überlappt.
6. Drücken Sie mit der Hand die Kleberänder an, um eine optimale Haftung auf der Haut zu gewährleisten (Dieser Vorgang ist wichtig für die Dichtigkeit des Verband-Beutels. Nach Anbringen warten Sie 10 Minuten, bis die Klebekraft vollständig eingetreten ist.



KLASSIFIKATION • MEDIZINPRODUKT - KLASSE I  zertifiziert
BIOKOMPATIBILITÄT • IN ÜBEREINSTIMMUNG UNI EN ISO 10993 STANDARD
STERILIZATION • UNSTERILE
HALTBARKEIT • 2 JAHRE



• ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG